

温熱愛好者のアイデアから生まれた、
「注熱したいところ」に手が届く、マイハンドらくらくⅡ。



5,695円 税抜価格

※三井式温熱治療器Ⅱは別売りです

製品概要

・製品名	マイハンドらくらくⅡ
・付属品	コード固定用ゴムバンド×2


・材質	ポリプロピレン
-----	---------

三井温熱 株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台3-36-1
TEL: 0476-37-8771

使い方その① 「背中に」使う

手が届かない背骨まわりにもじっくりと注熱

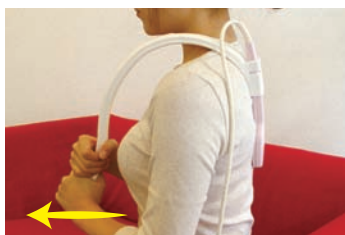


- 手の移動はゆっくり・小さくを意識してみましょう。
- 数秒置いたら場所を変え、次の場所で同様に押し出します。

- 1 カーブ部分を動かしながら、圧をかけたい場所にヘッドがくるよう微調整します
- 2 場所が決まったら柄の末端部分を両手で持ち、ゆっくり・小さく前方に押し出します

使い方その② 「身体をねじって」使う

背中下側の部分も、少しの力で注熱できます

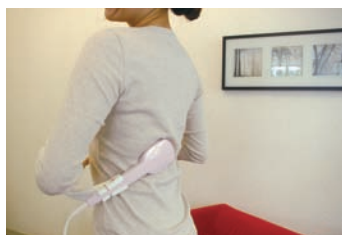

- 一つの箇所にこだわりすぎずに、数秒置いたら場所を変えます。
- 左右を持ち替えて、同様に引いて使います。

- 1 右手で柄の部分を持ち、左手でカーブ部分を持ちます
- 2 胴をはさむようにして回し入れ、圧をかけたい部分に固定しながら身体だけねじります

使い方その③ 「流して」使う

マイハンドだからできる「背中の流し」が気持ちいい



- 「流し」として使う場合は、温熱器付属のヘッドカバー（白布）がない方が滑りやすく心地よく熱が入ります。
- ランニングシャツやキャミソールでの使用は思わぬやけどにつながります。絶対におやめください。

- 1 左手で柄の部分を持ち、右手でカーブ部分を持ちます
- 2 左手はなるべく固定したままで、右手首を返すようにして流します

使い方その④ 「引いて」使う

ほしいポイントにしっかり圧をかけて注熱できる



- 一つの箇所にこだわりすぎずに、数秒置いたら場所を変えます。
- 左右を持ち替えて、同様に引いて使います。

- 1 肩から回して肩甲骨に。左手で柄の部分を持ち、右手でカーブ部分を持ちます
- 2 左手を支点にして、右手を前方に引くようにすると、心地よい圧がかかります

取扱い上のご注意

1. 本製品は三井式温熱治療器Ⅱ専用です。三井式温熱治療器Ⅱを本体に取り付けて使用する目的以外には、絶対に使用しないでください。
2. 三井式温熱治療器Ⅱを取り付ける際は、コードを傷めないように気をつけながら強めに押し込んでご使用ください。
3. コードが必要以上に引っ張られると三井式温熱治療器Ⅱの故障の原因になります。十分に注意してご使用ください。
4. 同じ箇所に集中して注熱を行うと低温ヤケドの原因になりますのでご注意ください。
5. ストーブ等高温になる場所での使用・放置は絶対にお避けください。本体の変形、火災の原因となります。
6. 小さいお子様の手の届かないところに保管・管理をお願いします。
7. 付属のゴムバンドを別途お求めの際は、ホームセンター等で類似のものをお求めください。